

Přečtěte si prosím pečlivě všechny instrukce před použitím. Najdete zde informace, které vám pomohou zvládnout spotřebič bezpečně používat a maximalizovat jeho efektivitu.

Sterilizátor je určen pro rychlou tepelnou sterilizaci malých a středních nástrojů. Vzhledem ke své malé velikosti a vysoké stabilitě, můžete umístit přístroj buď na pracovní stůl, polici nebo na vozík.

Důležité: prosím pozorně přečtěte tento návod před použitím a uschovejte jej.

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- Chcete-li ušetřit čas, prosím zavřete víko během ohřevu.
- Nepokládejte žádné předměty vyrobené z papíru, textilu, gumy, dřeva, plastu nebo jiné snadno vznětlivé materiály v nádobě nebo jeho blízkosti.
- Nepoužívejte zařízení v případě, že nejsou křemenové kuličky v nádobě.
- Vypněte hlavní vypínač a zavřete víko po použití.
- Nevkládejte špinavé nebo mokré nástroje do nádoby.
- VAROVÁNÍ: Neinstalujte spotřebič do vody a nepoužívejte v její blízkosti.
- Nedotýkejte se kovových součástí sterilizátoru při sterilizaci a několik minut po vypnutí.
- Čištění by mělo být provedeno po vypnutí a úplném zchlazení zařízení
- Nikdy nečistěte přístroj vodou, pouze přípravky určené přímo k čištění sterilizátorů
- obraťte se na servisní středisko v případě jakékoliv závady. Prosím, nepokoušejte se opravovat spotřebič.

2. SPUŠTĚNÍ A POUŽITÍ:

1. Ujistěte se prosím, že je přístroj vypnutý a umístěte jej na stabilní povrch.
2. Otevřete víko a dejte křemenné kuličky do nádoby, ne více než 80 % objemu nádrže.
3. Nepřipojujte dříve, než jste si jisti, že napětí v přístroji i v elektrickém zdroji jsou stejné.
4. Zapojte přístroj do zásuvky.
5. Zapněte vypínač. Kontrolka ohřevu se rozsvítí červeně a přístroj začne ohřívat křemenné kuličky.
6. Po zahřátí 10-12 minut, když zhasne, vložte nástroje, které potřebujete desinfikovat (např.: nůžky, břitvy atd.) do křemenných kuliček vertikálně.
7. Zahřejte nástroje na 20-30 sekund, pak si nasadte rukavice a vyjměte sterilizované nástroje.
8. Když teplota nádoby dosáhne 200 °C, kontrolka ohřevu automaticky zhasne a přístroj zastaví nahřívání. A zařízení bude automaticky udržovat teplotu. Když bude teplota příliš nízká, kontrolka ohřevu znovu zčervená.

3. PŘÍPRAVA NÁSTROJŮ PRO STERILIZACI:

- Všechny přístroje musí být čisté a bez jakýchkoliv nečistot.
- Znečištění může poškodit nádobu a nástroje.
- Prosím, osušte nástroje před sterilizací.
- Nástroje by neměly kontaktovat nádobu.
- Prosím, nevkádejte příliš mnoho nástrojů najednou.

4. STERILIZACE:

Sterilizace trvá pouze několik sekund: cca 20-30 sekund v závislosti na velikosti nástroje. Teplota v nádrži dosáhne 200 °C. Vzhledem ke krátké době sterilizaci a díky účinků křemene, je minimalizován negativní dopad na vysoké teploty.

5. ZÁRUKA:

Záruka je vyloučena, pokud zařízení bylo špatně zapojeno, nebo byl přístroj poškozen v důsledku nesprávného použití a tím nedodržení návodu k obsluze. Oprava nebyla provedena neoprávněnými osobami. Díly, které jsou předmětem opotřebení nejsou zahrnuty do této záruky.

TECHNICKÁ DATA:

Teplota: 200 °C.
Nerezová nádoba
220 V, 50 Hz/60 Hz
75 W


VÝROBCE:

Hubert a KriegerGmbH
Werkzeugstr.14
58093Hagen
Deutschland

DODAVATEL:

Detail – Hair style s.r.o.
Třebíčská 1678/60
594 01 Velké Meziříčí
+420 566 440 099
+421 221 201 099

www.svetkadernictvi.cz
www.svetkadernictva.sk
www.hairzone.eu

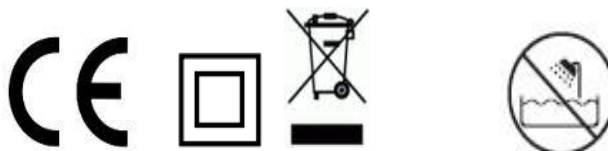

Prečítajte si prosím pozorne všetky inštrukcie pred použitím. Nájdete tu informácie, ktoré vám pomôžu zvládnuť spotrebič bezpečne používať a maximalizovať jeho efektivitu.

Sterilizátor je určený pre rýchlu tepelnú sterilizáciu malých a stredných nástrojov. Vzhľadom k svojej malej veľkosti a vysokej stabilite, môžete umiestniť prístroj buď na pracovný stôl, policu alebo na vozík.

Dôležité: prosím pozorne prečítajte tento návod pred použitím a uschovajte ho.

1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

- Ak chcete ušetriť čas, prosím zatvorte veko počas ohrevu..
- Nepokladajte žiadne predmety vyrobené z papiera, textilu, gumy, dreva, plastu alebo iné ľahko zápalné materiály v nádobe alebo jeho blízkosti.
- Nepoužívajte zariadenie v prípade, že nie sú křemenové guľičky v nádobe.
- Vypnite hlavný vypínač a zatvorte veko po použití.
- Nevkladajte špinavé alebo mokré nástroje do nádoby.
- VAROVANIE: Neinštalujte spotrebič do vody a nepoužívajte v jej blízkosti.
- Nedotýkajte sa kovových súčastí sterilizátora pri sterilizácii a niekoľko minút po vypnutí.
- Čistenie by malo byť vykonané po vypnutí a úplnom schladení zariadenia
- Nikdy nečistite prístroj vodou, len prípravky určené priamo na čistenie sterilizátorov.
- Obráťte sa na servisné stredisko v prípade akejkoľvek poruchy. Prosím, nepokúšajte sa opravovať spotrebič.

2. SPUSTENIE A POUŽITIE:

1. Uistite sa prosím, že je prístroj vypnutý a umiestnite ho na stabilný povrch.
2. Otvorte veko a dajte křemeň (guľičky) do nádoby, nie viac ako 80% objemu nádrže.
3. Nepripájajte skôr, než ste si istí, že napätie v prístroji aj v elektrickom zdroji sú rovnaké.
4. Zapojte prístroj do zásuvky.
5. Zapnite vypínač. Kontrolka ohrevu sa rozsvieti na červeno a prístroj začne ohrievať křemenné guľičky.
6. Po zahriatí 10-12 minút, keď zhasne, vložte nástroje, ktoré potrebujete dezinfikovať (napr.: nožnice, britvy atď) do křemenných guľičiek vertikálne.
7. Zahrejte nástroje na 20-30 sekúnd, potom si nasadte rukavice a vyberte sterilizované nástroje.
8. Keď teplota nádoby dosiahne 200 °C, kontrolka ohrevu automaticky zhasne a prístroj zastaví nahrievanie. A zariadenie bude automaticky udržiavať teplotu. Keď bude teplota príliš nízka, kontrolka ohrevu znovu sčervená.

3. PRÍPRAVA NÁSTROJOV PRE STERILIZÁCIU:

- Všetky prístroje musia byť čisté a bez akýchkoľvek nečistôt.
- Znečistenie môže poškodiť nádobu a nástroje.
- Prosím, osušte nástroje pred sterilizáciou.
- Nástroje by nemali kontaktovať nádobu.
- Prosím, nevkladajte príliš veľa nástrojov naraz.

4. STERILIZÁCIA:

Sterilizácia trvá iba niekoľko sekúnd: cca 20-30 sekúnd v závislosti na veľkosti nástroje. Teplota v nádrži dosiahne 200 °C. Vzhľadom ku krátkej dobe sterilizáciu a vďaka účinkom křemeňa, je minimalizovaný negatívny vplyv na vysoké teploty.

5. ZÁRUKA:

Záruka je vylúčená, ak zariadenie bolo zle zapojené, alebo bol prístroj poškodený v dôsledku nesprávneho použitia a tým nedodržanie návodu na obsluhu. Oprava nebola vykonaná neoprávnenými osobami. Diely, ktoré sú predmetom opotrebenie nie sú zahrnuté do tejto záruky.

TECHNICKÉ DÁTA:

Teplota: 200 °C
Nerezová nádoba
220 V, 50 Hz/60 Hz
75 W

VÝROBCA:

Hubert a KriegerGmbH
Werkzeugstr.14
58093Hagen
Deutschland

DODÁVATEL:

Detail – Hair style s.r.o.
Třebíčská 1678/60
594 01 Velké Meziříčí
+420 566 440 099
+421 221 201 099

www.svetkadernictvi.cz
www.svetkadernictva.sk
www.hairzone.eu

